

# VisCheck

ビズチェック

SARS-CoV-2 抗原検査キット

唾液用

ご使用方法

Ver.2.0



本品は研究用試薬であり、薬機法に基づく体外診断用医薬品の承認は受けておりません。

## キットの内容

① A チューブ (フタ付き綿棒入り)



② B チューブ (フタ入り)




③ 検査カセット (アルミパッケージに入っています)




## 結果判定

判定例を模式的に表したものであり、実際の見え方とは異なります。


**陽性** 2本ともラインが見えている場合

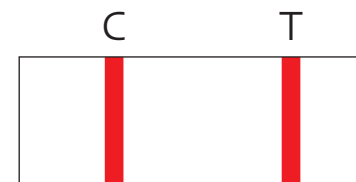

実際の例


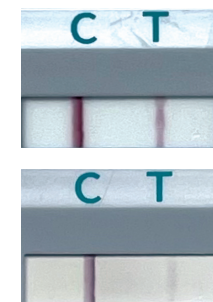


**陰性** Cの下に1本のラインが見えている場合

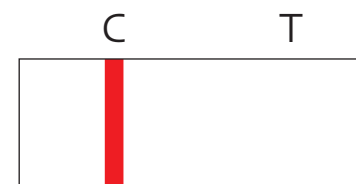

※ 15分以上経過した場合、2本のラインが見ることがありますが、判定には使用しないでください。


**無効** Cの下にラインが見えていない場合

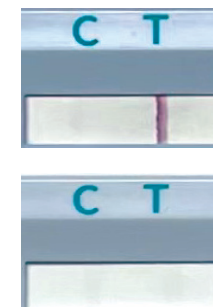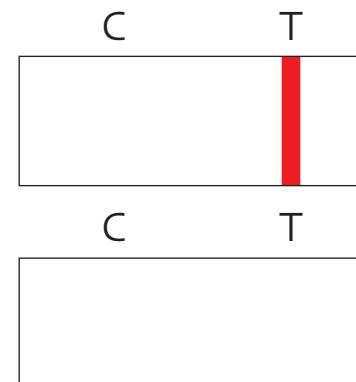

# 手順書

## 1. 唾液をとる

綿棒のスポンジ部分が完全に柔らかくなるまで、軽く噛むようにして唾液を含ませる。(3分)

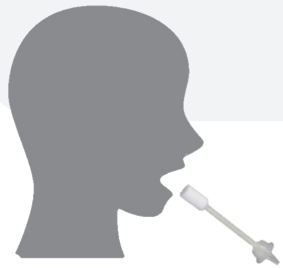

## 2. Aチューブ開封

Aチューブのシールを取り外す。  
※液をこぼさないように注意してください。



## 3. 綿棒を挿入する

唾液を含んだ綿棒を、フタがしまるまでしっかりとチューブに挿入する。



## 4. Bチューブ開封

Bチューブのシールを取り外す。  
※液をこぼさないように注意してください。




## 5. 試薬に唾液を入れる

手順3のAチューブから手順4のBチューブの中に液を**1滴**、垂直に滴下する。



## 6. フタをしめる

Bチューブにフタをしっかりと装着する。

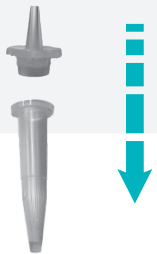

## 7. 液を混ぜる

Bチューブの中の液をしっかりと混ぜるために、チューブの下の方を10回揉む。

※Bチューブ下部はやわらかく、もみやすくなっています。



## 8. カセットに滴下する

検査カセットを平らな場所に置き、手順7の液を**4滴**、滴下窓に**1滴ずつ**ゆっくりぽたぽたと滴下する。



## 9. 判定結果を待つ

15分後に判定を行います。ただし、15分より前でも2本ともラインが見えている場合、「陽性」と判定できません。

※15分以上経過した場合、2本のラインが見えることがありますが、判定には使用しないでください。

